



Laboratorio Clínico
Hospital de Urgencia Asistencia Pública

TIEMPO DE PROTROMBINA EN SANGRE

Código BiosLIS 0301059

Horario de procesamiento

Lunes a Domingo. 24 horas.

Preparación del paciente

No requiere preparación.

Muestra

Sangre en tubo con Citrato de Sodio (tapa celeste).

Tiempo de envío óptimo hacia laboratorio

Máximo 1 hora.

Transporte a Laboratorio

Refrigerada.

Método/Equipo

Automatizado / Sysmex CS 2500.

Valores de Referencia

	Unidad de medida	Mujer/Hombre
Tiempo de protrombina	Segundos	10.8 a 14.3
Actividad de Protrombina	%	70 a 120
INR	N//A	



Laboratorio Clínico
Hospital de Urgencia Asistencia Pública

Valor Crítico

INR: Mayor a 5.

Interferencias

- Las muestras lipémicas o turbias que no puedan aclararse por centrifugado (10 minutos a aproximadamente 15 000 x g) deben ser excluidas del ensayo.

Elaborado por:
TM. Daniela Herrera B.
Coordinadora Laboratorio Clínico

Revisado por:
TM. Daniela Gutiérrez M.
Jefe Técnico Laboratorio Clínico
Mayo, 2024. V1