



BILIRRUBINA TOTAL

Código BiosLIS 0302012

Horario de procesamiento

Lunes a Domingo. 24 horas.

Preparación del paciente

No requiere preparación.

Muestra

Sangre en tubo con heparina de litio (tapa verde).

Tiempo de envío óptimo hacia laboratorio

Máximo 1 hora.

Transporte a Laboratorio

Refrigerada.

Método/Equipo

Colorimétrico DPD / Cobas 6000 - c501 (Roche).

Valores de Referencia

Mujer: 0.0 – 1.2 mg/dL

Hombre: 0.0 – 1.2 mg/dL

Valor Crítico

No aplica.



Interferencias

- **Fármacos:** No se han registrado interferencias con paneles de fármacos de uso común en concentraciones terapéuticas.
- **Excepción:** La fenilbutazona y el Cyanokit (hidroxocobalamina) proporcionan resultados artificialmente bajos de bilirrubina. No analizar las muestras que contienen verde de indocianina.



Elaborado por:
TM. Daniela Herrera B.
Coordinadora Laboratorio Clínico

Revisado por:
TM. Daniela Gutiérrez M.
Jefe Técnico Laboratorio Clínico
Mayo 2024, V1.