



Laboratorio Clínico
Hospital de Urgencia Asistencia Pública

HAPTOGLOBINA EN SANGRE

Código BiosLIS 0301035

Horario de procesamiento

- Martes de 08:00 a 20:00 hrs.
- Viernes de 08:00 a 20:00 hrs.

Preparación del paciente

No requiere preparación.

Muestra

Sangre en tubo con heparina de litio (tapa verde).

Tiempo de envío óptimo hacia laboratorio

Máximo 1 hora.

Transporte a Laboratorio

Refrigerada.

Método/Equipo

Inmunoturbidimetría / Cobas 6000 - c501 (Roche).

Valores de Referencia

Mujer: 30 – 200 mg/dL

Hombre: 30 – 200 mg/dL



Valor Crítico

No aplica.

Interferencias

- Los factores reumatoides hasta 250 UI/mL no interfieren en el test.
- **Efecto prozona (high-dose hook):** no se produjeron resultados falsos hasta una concentración de haptoglobina de 12 g/L (120 μ mol/L, 1200 mg/dL).
- **Fármacos:** no se registró ninguna interferencia a concentraciones terapéuticas con paneles de fármacos de uso común.

Elaborado por:
TM. Daniela Herrera B.
Coordinadora Laboratorio Clínico

Revisado por:
TM. Daniela Gutiérrez M.
Jefe Técnico Laboratorio Clínico
Mayo, 2024. V1.