



LITIO EN SANGRE

Código 0302055

Horario de procesamiento

Lunes a Domingo. 24 horas.

Preparación del paciente

No requiere preparación.

Muestra

Sangre en tubo sin anticoagulante (tapa roja).

Tiempo de envío óptimo hacia laboratorio

Máximo 1 hora.

Transporte a Laboratorio

Refrigerada.

Método/Equipo

Colorimétrico/ Cobas c501 (Roche).

Valores de Referencia

Concentración terapéutica: 0.6 – 1.2 mEq/L

Valor Crítico

≥ 1.5 mEq/L

Interferencias

- Ictericia
- Hemólisis
- Lipemia



Elaborado por:

TM. Camila Valenzuela B.

Encargada de Calidad Laboratorio Clínico

Marzo, 2025.

Revisado por:

TM. Daniela Gutiérrez M.

Jefe Técnico Laboratorio Clínico

Marzo, 2025. V1